

人工呼吸器

	Infinityシリーズ EvitaV500、EvitaV300	Evitaシリーズ EvitaXL、Evita4、Evita2Dura	Savinaシリーズ Savina300、Savina
酸素の途絶	1)空気での動作が可能。 酸素供給圧低下アラーム発生 FiO2 21%以上の設定では 酸素濃度低下アラームが発生	1)空気での動作が可能。 酸素供給圧低下アラーム発生 FiO2 21%以上の設定では 酸素濃度低下アラームが発生	1)空気での動作が可能。 酸素供給圧低下アラーム発生 FiO2 21%以上の設定では 酸素濃度低下アラームが発生
空気の途絶	1)酸素での動作が可能。 空気供給圧低下アラーム発生 FiO2 100%以下の設定では 酸素濃度上昇アラーム発生 オプション:GS500搭載の場合 途絶と同時にブLOWER起動 空気供給継続可能	1)酸素での動作が可能。 空気供給圧低下アラーム発生 FiO2 100%以下の設定では 酸素濃度上昇アラーム発生 オプション:コンプレッサー搭載の場合 途絶と同時にコンプレッサー起動 空気供給継続可能	ブLOWER内臓のため 圧縮空気接続は行っておりませ ん。
電源の途絶	1)内臓バッテリーで動作可能 (~30分) 2)オプション:PS500(追加バッテ リー)最大360分 動作可能 3)オプション:PS500+GS500(追加ブ LOWER) 最大180分 空気供給しながら換気 動作継続	1)内臓バッテリーで動作可能 (~15分) 2)オプション:追加バッテリー 最大180分 動作可能	1)内臓バッテリーで動作可能 (~45分) 2)オプション:追加バッテリー 最大240分 動作可能
全て途絶	オプション:PS500+GS500(追加ブロー ワー) 最大180分 21%の空気供給しなが ら換気動作継続	換気継続不可	オプション:追加バッテリー 最大240分 21%の空気供給しなが ら換気動作継続